

## 注意事項／切除時のグリップ方法

両手で強くしっかりとグリップしてください。



画像のようなグリップは、切除時ハンドピースの安定が保てません。

## 注意事項／切除手順

1. 切除時の振動により、ガイド固定ノブがゆるむ可能性があるため、  
強く締め付けてください。
2. 既存骨切り平面部にガイド平面部を正確に密着させてください。
3. ガイド／ブレードがたわまない程度の軽い力で押さえてください。

その後、左右に少しずつ滑らせながら前方向に切除を進めてください。