



共同開発医師監修による当社豚骨切除試験数値エビデンス

株式会社 ミヤタニ


1mm 切除時画像
initial cutting mode

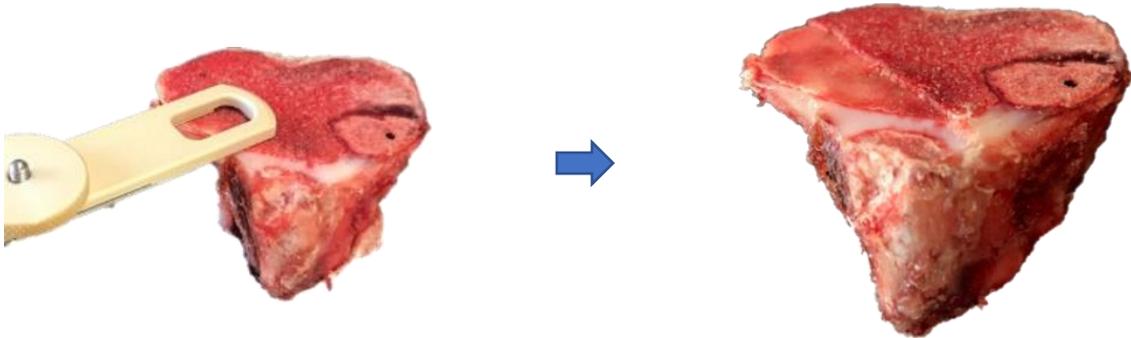

bone shaver mode

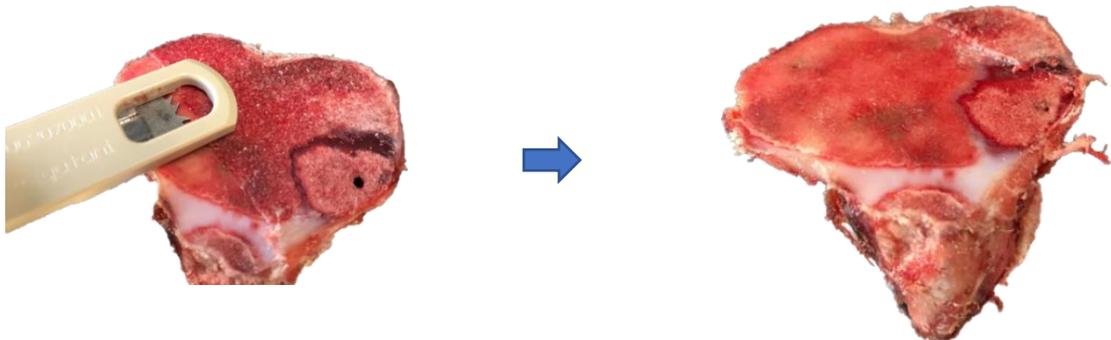

final cutting mode

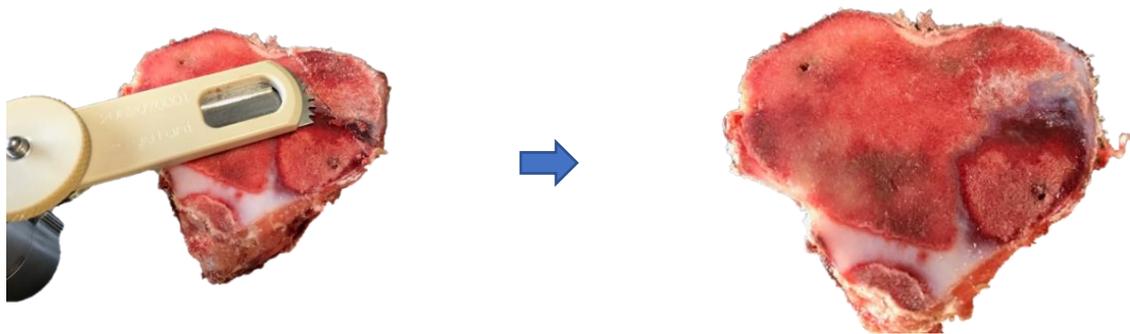

<1mm 追加骨切り量>

- 平均：1.044mm
- 標準偏差：0.07mm
- 最少～最大：0.832～1.170mm
- 最大誤差範囲：-0.168～0.170mm（誤差幅 0.338mm）

平均 0.044mm 多めに切れるが、 ± 0.169 mm の中に全て収まっており、最初の骨切りが正確とすれば、 ± 0.169 mm の精度での 1mm の追加骨切りが可能という結果になりました。

※術者により数値は異なり、精度保証を行うものではありません。